

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ РАЗОВОЙ МОЧИ

Общая

Набор для пациента:

- Транспортный пластиковый стерильный контейнер с крышкой (СКК)



Сбор биоматериала

- После пробуждения провести тщательный туалет наружных половых органов и области заднего прохода, промыв их под душем с мылом.
- При первом мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 1-2 секунды мочеиспускания) выпустить в унитаз, затем, не прерывая мочеиспускания, подставить контейнер для сбора мочи.
- Собирается около 30-40 мл (1/2 - 2/3 контейнера) средней порции утренней мочи.

Хранение и транспортировка

- При t +2...+8°C общее время хранения и транспортировки не более 24 часов с момента взятия материала.
- Транспортировка образца допускается только с аккумуляторами холода (хладагентами).

Соблюдение рекомендаций напрямую влияет на результат исследования.